


新型コロナPCR検査 ご案内

< 団体検査用 >

キット内容

- ① 唾液採取容器(1次容器)
- ② バイオパウチ(2次容器)
- ③ 検体識別シール
- ④ 給水マット
- ⑤ 輪ゴム
- ⑥ セキュリテーシール
- ⑦ 梱包箱(3次容器)
- ⑧ 返送用箱

※各内容物の写真はイメージです。
実際とは異なる場合があります。

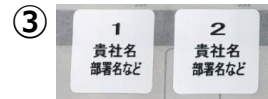

【検査にあたってのご注意】

唾液採取前30分は、飲食・喫煙・歯磨き(マウスウォッシュ)は行わないでください。
ウイルスが流れたり、食品や歯磨き粉等の成分が混ざってしまい、正しい検査が行えません。

<推奨>

2時間前に歯磨きをして口の中を清潔にし、食事や喫煙を控え、さらに唾液採取30分前からは飲み物も控えていただきますと正確性が高まります。

検査の手順

【手順1】

袋から唾液採取容器とストローを取り出してください。
唾液採取容器の蓋をあけて、ストローを使って唾液を採取してください。



1.5ml 目盛を目安に、唾液を入れてください。唾液の量が少ないと検査ができないことがあります。

※使用したストローは破棄してください。



裏面へつづく ⇒

